

二次治癒ハイドロゲル創傷被覆・保護材


アロンキユア[®]

Aron cure [Dental] デンタル

抜歯後の出血は



「フタ」をして止血する

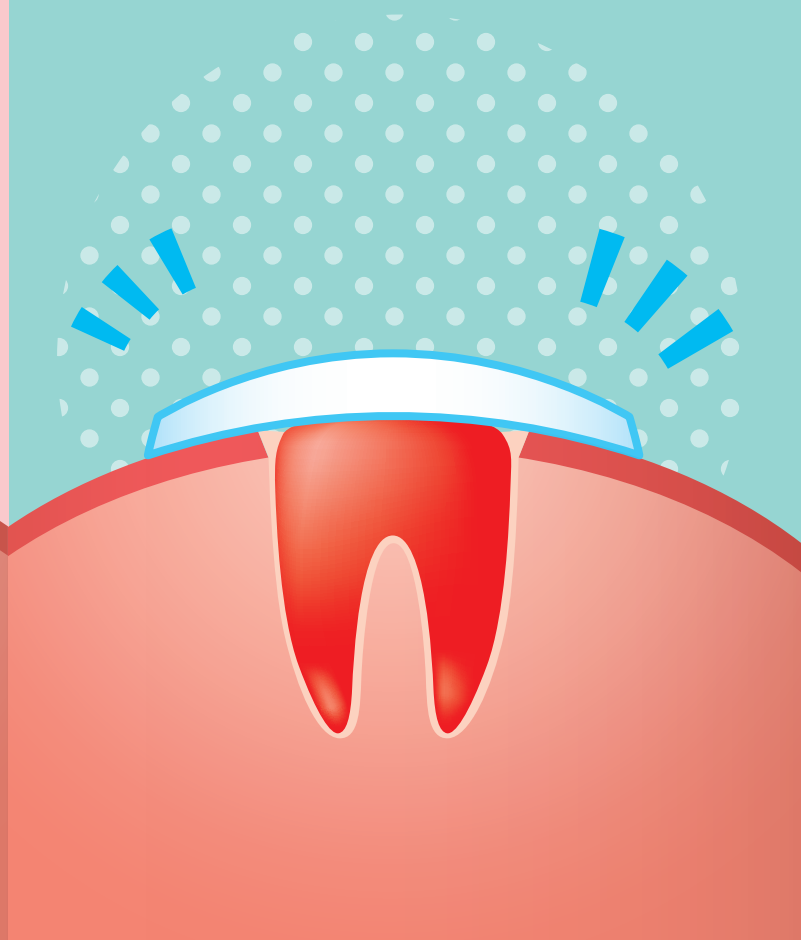

止血処置はアロンキユアを 抜歯窩に適用するだけ

抜歯窩を被覆して止血

ハイドロゲル化

血液や唾液を吸収し
ハイドロゲル化します。


血餅の保持

抜歯窩に血液が溜まるので
血餅が保持しやすくなります。


強固に粘着

ハイドロゲル化すると
歯茎と強固に粘着し
隙間を塞ぎます。


使用イメージ

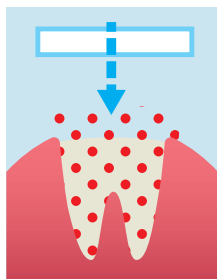


アロンキユアを乾いたピンセットなどで取り出し、抜歯窩を覆うように軽く抑え適用します。

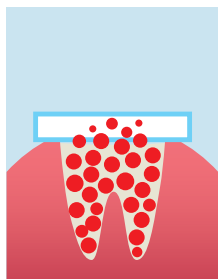

アロンキユアが血液や唾液を吸収し、ハイドロゲル化します。

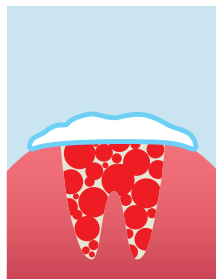

ハイドロゲルが創部にすばやく粘着します。血液の漏出を防ぎ止血します。

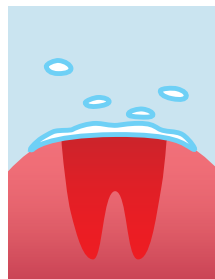

唾液などでしだいに溶解され、創部から遊離し消失していきます。



後処理
不要

アロンキユアの消失後は、後処理不要です。

アロンキユア デンタルの特長

短時間での
止血処置

+

圧迫止血が
必要ない

+

後処置が
不要

アロンキユアは創部に迅速に粘着することで、短時間で止血処置が完了します。患者様に長時間ガーゼなどを噛んでもらい圧迫止血する必要がなく、処置後も口腔内で融解し自然と消失します。これにより、患者様の負担が軽減され、効率的な止血処置が可能となります。



アロンキユア デンタル
3個入り(滅菌済み)・単回使用

●販売名:アロンキユア デンタル ●一般的名称:二次治療ハイドロゲル創傷被覆・保護材 ●承認番号:30600BZX00071000 ●分類:高度管理医療機器 クラスIII
※使用前に必ず電子添文をご確認ください。使用中に異常を感じた場合は直ちに使用を中止してください。 ※印刷物のため、実際の色調とは異なる場合がございます。仕様および外観は予告なく変更することがありますので、予めご了承ください。

お問合せ先

販売元



株式会社 デンタリード

本社/大阪市淀川区新高 1-1-15

TEL: 06(6396)4448 フリーFAX: ☎0120(24)0892

東京営業所/東京都千代田区神田小川町 1-11 千代田小川町クロス 12F

TEL: 03(5217)0353 FAX: 03(5217)0366

<https://www.dentalead.co.jp>



製造販売元 東亜合成株式会社