

アライナーのケア方法

STEP
1


アライナー(マウスピース型矯正装置)の全体が濡れるように、約10cmほど離して、適量(3〜4プッシュ)をスプレーする。

STEP
2

スプレー後、そのまま乾燥させる。もしくは、清潔な布等で拭き取るか、水で洗い流す。

Point!

上下顎のアライナーを
ケースに並べ、
同時にスプレーが
おすすめ!

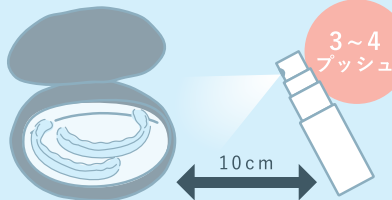

※食べカスや目に見える汚れは取り除いてからご使用ください。
※つけ置きタイプの洗浄剤との併用も可能です。



モンダミン
アライナークリアスプレー 30mL
1回の使用(0.5mL)で60回分

 **アース製薬株式会社**

東京都千代田区神田司町2-12-1

お客様からお気づきを頂く窓口 **0120-81-6456**



詳しくはコチラ



歯科医院でしか
買えない

お出かけ先でも手軽にケア
いつでも清潔、ずっと爽やか



**Aligner Clear
Spray**

アライナークリアスプレー

お出かけ先で
こんな**お悩み**はありませんか？

少し
臭うかも…

スルスル
する…


色がついて
きたかも…



＼その原因は…／

目に見えない**何十億もの菌**がアライナー表面に
付着したままだと**ニオイやヌメリ**のもとに！

⚠ 唾液 1 mL だけでも億単位の菌がいます。

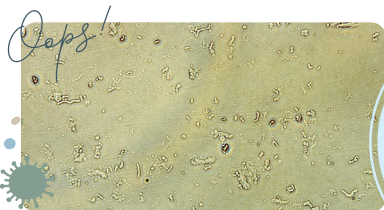


アライナー
表面に
付着している菌

球菌（きゅうきん）や
桿菌（かんきん）など
多くの菌が存在

水洗いだけでは
ほとんど菌はそのまま！

⚠ 装着時間が長いほど、菌が蓄積していきます。

アライナークリアスプレーなら手軽で簡単！
シュッとすることで**99.9%*除菌**

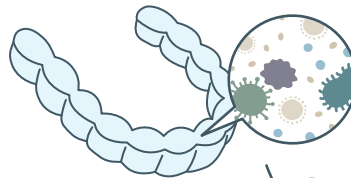

ニオイやヌメリの
原因菌を**瞬間ケア！**

さらに、
新たな菌や汚れの
付着をブロック！



※イラストはイメージです。
*全ての菌を除菌するわけではありません。

フレッシュミントの香り

（外した時に）
いつでもどこでも安心！

このような時に…

お出かけ先で

歯磨きの時に

スッキリ
したい時に

